



Blut-im-Stuhl Test

Gebrauchsanweisung

Allgemeine Hinweise


- Den Behälter nur einmal benutzen, für Kinder unzugänglich aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Die transparente Kappe nicht öffnen oder versuchen zu öffnen.



1

SCHRITT 1

Öffnen Sie die Auffanghilfe und kleben Sie diese auf den WC Rand.

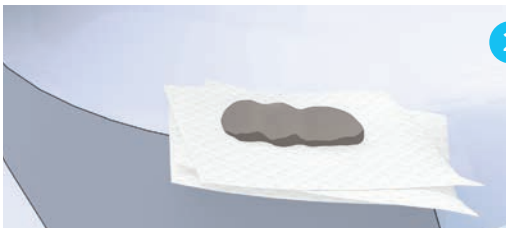

2

SCHRITT 2

Stuhlgang erledigen. Der Stuhl darf nicht mit Wasser oder Urin in Kontakt kommen.




3

SCHRITT 3

Schrauben Sie den grünen Deckel vom Röhrchen.

Blut-im-Stuhl Test – Gebrauchsanweisung

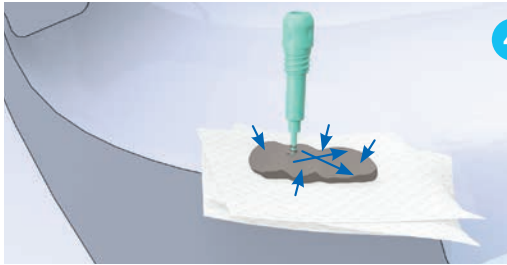

4

SCHRITT 4

Stechen Sie mit dem grünen Stäbchen zuerst an vier Stellen in den Stuhl und streichen Sie danach kreuzweise über die Stuhloberfläche.



5

SCHRITT 5


Alle Rillen im Stäbchen müssen mit Stuhl gefüllt sein.



6

SCHRITT 6

Schrauben Sie den grünen Deckel wieder auf das Röhrchen. Schütteln Sie das Röhrchen mehrfach.

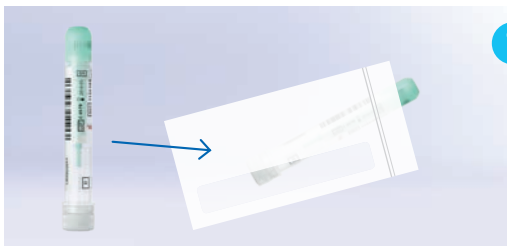

7

SCHRITT 7

Schicken Sie das verschlossene Röhrchen nach der Entnahme innerhalb von 24 Stunden im Rücksendecouvert zurück.